



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

POLISENSIDISC 15

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 unidades de PoliseNSIDISC, cada unidade composta de 15 antimicrobianos específicos para cada série.

PRINCÍPIO

Sistema PoliseNSIDISC composto de um módulo circular, contendo em seu anel externo 10 antimicrobianos e anel interno 05 antimicrobianos, totalizando 15 antimicrobianos para cada série.

POLISENSIDISC DME é para ser usado em placas de Petri de 150 mm de diâmetro por 20 mm de altura.

POLISENSIDISC DME GRAM POSITIVO

Halos de inibição em mm

Antibacteriano	Potência/Código	Resistente	Intermediário	Sensível
Amoxicilina/Ácido Clavulânico	AMC 30	< 19	-	≥ 20
Ampicilina	AMP 10	≤ 28	-	≥ 29
P/Staphylococcus		≤ 16	-	≥ 17
P/Enterococcus				≥ 24
P/Streptococcus spp (só Beta)		≤ 18	19-21	≥ 22
P/ Haemophilus spp				≥ 18
Cefalotina	CFL 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Cefoxitina	CFO 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Ciprofloxacina	CIP 05	≤ 15	16-20	≥ 21
Clindamicina*	CLI 02	≤ 14	15-20	≥ 21
Cloranfenicol	CLO 30	≤ 12	13-17	≥ 18
Eritromicina	ERI 15	≤ 13	14-22	≥ 23
Gentamicina	GEN 10	≤ 12	13-14	≥ 15
Oxacilina para Stc. aureus	OXA 01	≤ 10	11-12	≥ 13
Cefoxitina para Stc. aureus	CFO 30	≤ 21	-	≥ 22
Oxacilina para Stc. coag. Neg.	OXA 01	≤ 17	-	≥ 18
Cefoxitina para Stc. coag. Neg.	CFO 30	≤ 24	-	≥ 25
Penicilina G	PEN 10	≤ 28	-	≥ 29
P Staphylococcus				≥ 20
P/ Streptococcus Pneumoniae (1µg Oxacilina)				≥ 24
P/ Streptococcus spp		≤ 14		≥ 15
P/ Enterococcus spp		≤ 16	27-46	≥ 47
P/ N. gonorrhoeae				≥ 20
Rifampicina	RIF 05	≤ 16	17-19	≥ 16
Sulfazotrim	SUT 25	≤ 10	11-15	≥ 19
Tetraciclina	TET 30	≤ 14	15-18	≥ 17
Vancomicina	VAN 30	≤ 14	15-16	≥ 17
P/ Enterococcus spp				≥ 15
P/ Staphylococcus spp				≥ 17
P/ Streptococcus				≥ 17

* O disco de Clindamicina está localizado fora do sitio, para melhor visualização do D-teste.

CONSERVAÇÃO

Manter ao abrigo da luz, conservar em freezer.
Obs.: Os módulos deverão ser abertos no momento do uso.

Lote e Validade: Vide caixa

Referências Bibliográficas

CLSI - M2-A9 - Janeiro de 2008

Rua Tiradentes, 1320 - Telefax: (18) 3621-8670
Araçatuba - SP - CNPJ 65.013.120/0001-79
comercial@bacdme.com.br
www.bacdme.com.br

Responsável Técnico: Antonio C. De Fendi - CRBM 1005
Registro MS 10401600019