



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

POLISENSIDISC 15

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 unidades de PoliseNSIDisc, cada unidade composta de 15 antimicrobianos específicos para cada série.

PRINCÍPIO

Sistema PoliseNSIDisc composto de um módulo circular, contendo em seu anel externo 10 antimicrobianos e anel interno 05 antimicrobianos, totalizando 15 antimicrobianos para cada série. POLISENSIDISC DME é para ser usado em placas de Petri de 150 mm de diâmetro por 20 mm de altura.

POLISENSIDISC DME SÉRIE GRAM NEGATIVO

Antibacteriano	Potência/Código	Halos de inibição em mm		
		Resistente	Intermediário	Sensível
Amicacina	AMI 30	≤ 14	15-16	≥ 17
Amoxicilina/Acido Clavulânico	AMC 30	≤ 13	14-17	≥ 18
Ampicilina	AMP 10	≤ 13	14-16	≥ 17
Aztreonam	ATM 30	≤ 15	16-21	≥ 22
Cefalotina	CFL 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Cefepime	CPM 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Cefoxitina	CFO 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Ceftadizima	CAZ 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Ceftriaxona	CRO 30	≤ 13	14-20	≥ 21
Ciprofloxacina	CIP 05	≤ 15	16-20	≥ 21
Cloranfenicol	CLO 30	≤ 12	13-17	≥ 18
Gentamicina	GEN 10	≤ 12	13-14	≥ 15
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110	≤ 17	18-20	≥ 21
Sulfazotrim	SUT 25	≤ 10	11-15	≥ 16
Tetraciclina	TET 30	≤ 11	12-14	≥ 15

CONSERVAÇÃO

Manter ao abrigo da luz, conservar em freezer.
Obs.: Os módulos deverão ser abertos no momento do uso.

Lote e Validade: Vide caixa

Referências Bibliográficas

CLSI - M2-A9 - Janeiro de 2008

Rua Tiradentes, 1320 - Telefax: (18) 3621-8670
Araçatuba - SP - CNPJ 65.013.120/0001-79
comercial@bacdme.com.br
www.bacdme.com.br

Responsável Técnico: Antonio C. De Fendi - CRBM 1005
Registro MS 10401600019