



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

POLISENSIDISC 15

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 unidades de Polisensidisc, cada unidade composta de 15 antimicrobianos específicos para cada série.

PRINCIPIO

Sistema Poliseidisc composto de um módulo circular, contendo em seu anel externo 10 antimicrobianos e anel interno 05 antimicrobianos, totalizando 15 antimicrobianos para cada série.

POLISENSIDISC DME é para ser usado em placas de Petri de 150 mm de diâmetro por 20 mm de altura.

POLISENSIDISC DME SÉRIE URINÁRIA

Halos de inibição em mm

| Antibacteriano | Potência/Código | Resistente | Intermediário | Sensível |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|
| Ácido Nalídixico | NAL 30 | ≤ 13 | 14-18 | ≥ 19 |
| Amicacina | AMI 30 | ≤ 14 | 15-16 | ≥ 17 |
| Amoxicilina/Ac. Clavulânico | AMC 30 | ≤ 13 | 14-17 | ≥ 18 |
| Ampicilina | AMP 10 | ≤ 13 | 14-16 | ≥ 17 |
| Cefalotina | CFL 30 | ≤ 14 | 15-17 | ≥ 18 |
| Cefazolina | CFZ 30 | ≤ 14 | 15-17 | ≥ 18 |
| Cefepime | CPM 30 | ≤ 14 | 15-17 | ≥ 18 |
| Ceftriaxona | CRO 30 | ≤ 13 | 14-20 | ≥ 21 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | ≤ 15 | 16-20 | ≥ 21 |
| Gentamicina | GEN 10 | ≤ 12 | 13-14 | ≥ 15 |
| Nitrofurantoina | NIT 300 | ≤ 14 | 15-16 | ≥ 17 |
| Norfloxacina | NOR 10 | ≤ 12 | 13-16 | ≥ 17 |
| Ofloxacina | OFX 05 | ≤ 12 | 13-15 | ≥ 16 |
| Sulfazotrim | SUT 25 | ≤ 10 | 11-15 | ≥ 16 |
| Tetraciclina | TET 30 | ≤ 11 | 12-14 | ≥ 15 |

CONSERVAÇÃO

Manter ao abrigo da luz, conservar em freezer.

Obs.: Os módulos deverão ser abertos no momento do uso.

Lote e Validade: Vide caixa

Referências Bibliográficas

CLSI - M2-A9 - Janeiro de 2008

Rua Tiradentes, 1320 - Telefax: (18) 3621-8670
Araçatuba - SP - CNPJ 65.013.120/0001-79
comercial@bacdme.com.br
www.bacdme.com.br

Responsável Técnico: Antonio C. De Fendi - CRBM 1005
Registro MS 10401600019