



DIAGNÓSTICOS
MICROBIOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS

POLISENSIDISC 12

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 unidades de Polisensidisc, cada unidade composta de 12 antimicrobianos específicos para cada série.

PRINCIPIO

Sistema Polisensidisc composto de um módulo circular, contendo em seu anel externo 09 antimicrobianos e anel interno 03 antimicrobianos, totalizando 12 antimicrobianos para cada série.

POLISENSIDISC DME é para ser usado em placas de Petri de 150 mm de diâmetro por 20 mm de altura.

Staphylococcus spp

Halos de inibição em mm

Antibacteriano	Potência/Código	Resistente	Intermediário	Sensível
Cefepime	CPM 30	≤ 14	15-17	≥ 18
Cefoxitina	CFO 30	< 14	15-17	≥ 18
Ciprofloxacina	CIP 05	< 15	16-20	≥ 21
Clindamicina *	CLI 02	≤ 14	15-20	≥ 21
Cloranfenicol	CLO 30	≤ 12	13-17	≥ 18
Eritromicina *	ERI 15	≤ 13	14-22	≥ 23
Gentamicina	GEN 10	≤ 12	13-14	≥ 15
Oxacilina para <i>Stc. aureus</i>	OXA 01	≤ 10	11-12	≥ 13
Cefoxitina para <i>Stc. aureus</i>	CFO 30	< 21	-	≥ 22
Oxacilina para <i>Stc. coag. Neg.</i>	OXA 01	≤ 17	-	≥ 18
Cefoxitina para <i>Stc. coag. Neg.</i>	CFO 30	≤ 24	-	≥ 25
Penicilina G	PEN 10	≤ 28	-	≥ 29
Rifampicina	RIF 05	≤ 16	17-19	≥ 20
Sulfazotrim	SUT 25	≤ 10	11-15	≥ 16
Vancomicina	VAN 30	-	-	≥ 15

* Os discos de Clindamicina e Eritromicina estão localizados fora dos sítios, para melhor visualização do D-teste.

CONSERVAÇÃO

Manter ao abrigo da luz, conservar em freezer.

Obs.: Os módulos deverão ser abertos no momento do uso.

Lote e Validade: Vide caixa

Referências Bibliográficas

CLSI - M2-A9 - Janeiro de 2008

Rua Tiradentes, 1320 - Telefax: (18) 3621-8670

Araçatuba - SP - CNPJ 65.013.120/0001-79

comercial@bacdme.com.br

www.bacdme.com.br

Responsável Técnico: Antonio C. De Fendi - CRBM 1005

Registro MS 10401600019